

# MemoryTrack<sup>®</sup>

## PLACA PARA ALINHADORES



## Product Guide

# MemoryTrack®

## PLACA PARA ALINHADORES

*Tecnologia, resistência e máxima estética para alinhadores*

### Qualidade Comprovada

Tecnologia avançada com inovador Copoliéster PETG modificado com aditivo exclusivo, que impede a absorção de umidade.

### Resistente e Confiável

Material com alta ductilidade. Não fratura mediante às forças aplicadas durante o tratamento.

### Segurança

Matéria-prima 100% pura, sem resíduos ou materiais reciclados, com certificação para uso médico-odontológico.

### Precisão

Espessura constante, sem variações, aumentando o controle do resultado final.

### Resistência ao Estresse

Excelente memória de forma para manter a retenção e fornecer pressão constante durante todo o tratamento.

### Invisível

Alto índice de transparência e elevada resistência à pigmentação.

### Versatilidade

Dureza para exercer as forças necessárias para a movimentação ortodôntica e permanecer fixa na boca. Maleabilidade para proporcionar conforto ao paciente.



Confira nosso produto na loja!

# MemoryTrack® nas versões:



Embalagem

## ECONOMY

Formato: Redonda com diâmetro 125mm

Espessura	Quantidade
0,50 mm	40 un
0,63 mm	30 un
0,75 mm	30 un
0,85 mm	25 un
1,00 mm	20 un
1,50 mm	15 un

Embalagem

## STARTER

Formato: Redonda com diâmetro 125mm

Espessura	Quantidade
0,50 mm	10 un
0,63 mm	10 un
0,75 mm	10 un
0,85 mm	10 un
1,00 mm	10 un
1,50 mm	5 un



## Instruções de uso:

- Coloque a placa na termoplastificadora.
- Aqueça a termoplastificadora.
- Como cada termoplastificadora possui uma configuração de temperatura diferente, a dica é: quando a placa tiver formado cerca de 1,5cm de “barriga”, realize o processo de termoplastificação da placa sobre o modelo.

## Cuidados:

- As placas são embaladas com película protetora para mantê-las em perfeito estado durante armazenamento e transporte.
- Retire a película protetora da placa antes de termoplastificar.



*Dica: Remova a película protetora apenas do lado exposto diretamente ao calor da plastificadora, mantendo o plástico transparente no lado que ficará em contato com o modelo a ser termoformado, evitando possíveis contaminações por toxinas remanescentes e, garantindo assim, um acabamento translúcido no alinhador.*

## Orientações gerais:

- Se a placa não se conformar corretamente ao modelo, aumente o tempo de exposição.
- Se a placa ficar com folgas, vincos, sinais de deformação exagerada ou não ficarem transparentes, reduza o tempo de exposição.



Cuidado com a temperatura utilizada para moldar a placa para alinhador. Temperaturas elevadas podem ocasionar no aparecimento de bolhas. Observe se sua plastificadora possui controle de temperatura, caso não possua evite utilizar o equipamento superaquecido.

\*Válido para todas as marcas e placas para alinhadores.



Para limpeza dos alinhadores:



MATA 99%  
DAS BACTÉRIAS  
E DOS FUNGOS

ELIMINA  
MANCHAS  
E PLACAS

+RÁPIDO  
+EFICAZ

APROVADO POR  
CIRURGIÕES DENTISTAS  
**CONFIRA!**



A utilização de produtos abrasivos, como pastas de dentes podem trazer danos a aparência dos alinhadores ao longo do tempo.



Confira  
o vídeo!

# A coragem inspira e o cuidado transforma



O ICI oferece apoio às crianças e adolescentes acometidos pelo câncer infantil, já ganhando diversas vezes o Prêmio de Melhores ONGs.

E com o Selo da Coragem, na compra da Placa para Alinhadores MemoryTrack®, parte do valor vai **diretamente para a Instituição.**



Faça a sua parte!

Apoie o Instituto do Câncer Infantil, escolha a Placa para Alinhadores Memorytrack®!

# OrthoMundi



 [orthomundishop.com.br](http://orthomundishop.com.br)

  0800 510 3001

 [atendimento@orthomundi.com.br](mailto:atendimento@orthomundi.com.br)

 [@orthomundi](https://www.instagram.com/orthomundi)

 [@orthomundi](https://www.facebook.com/orthomundi)

 [youtube.com/orthomundi](https://www.youtube.com/orthomundi)