

MemoryTrack[®]

PLACA PARA ALINHADORES



Product Guide

MemoryTrack[®]

PLACA PARA ALINHADORES

Tecnologia, resistência e máxima estética para alinhadores

Qualidade Comprovada

Tecnologia avançada com inovador Copoliéster PETG modificado com aditivo exclusivo, que impede a absorção de umidade.

Resistente e Confiável

Material com alta ductilidade. Não fratura mediante às forças aplicadas durante o tratamento.

Segurança

Matéria-prima 100% pura, sem resíduos ou materiais reciclados, com certificação para uso médico-odontológico.

Precisão

Espessura constante, sem variações, aumentando o controle do resultado final.

Resistência ao Estresse

Excelente memória de forma para manter a retenção e fornecer pressão constante durante todo o tratamento.

Invisível

Alto índice de transparência e elevada resistência à pigmentação.

Versatilidade

Dureza para exercer as forças necessárias para a movimentação ortodôntica e permanecer fixa na boca. Maleabilidade para proporcionar conforto ao paciente.



Confira nosso produto na loja!

MemoryTrack nas versões:



Embalagem

ECONOMY

Formato: Redonda com diâmetro 125mm

Espessura	Quantidade
0,50 mm	40 un
0,63 mm	30 un
0,75 mm	30 un
0,85 mm	25 un
1,00 mm	20 un
1,50 mm	15 un

Embalagem

STARTER

Formato: Redonda com diâmetro 125mm

Espessura	Quantidade
0,50 mm	10 un
0,63 mm	10 un
0,75 mm	10 un
0,85 mm	10 un
1,00 mm	10 un
1,50 mm	5 un



Instruções de uso:

- Coloque a placa na termoplastificadora.
- Aqueça a termoplastificadora.
- Como cada termoplastificadora possui uma configuração de temperatura diferente, a dica é: quando a placa tiver formado cerca de 1,5cm de “barriga”, realize o processo de termoplastificação da placa sobre o modelo.

Cuidados:

- As placas são embaladas com película protetora para mantê-las em perfeito estado durante armazenamento e transporte.
- Retire a película protetora da placa antes de termoplastificar.



Dica: Remova a película protetora apenas do lado exposto diretamente ao calor da plastificadora, mantendo o plástico transparente no lado que ficará em contato com o modelo a ser termoformado, evitando possíveis contaminações por toxinas remanescentes e, garantindo assim, um acabamento translúcido no alinhador.

Orientações gerais:

- Se a placa não se conformar corretamente ao modelo, aumente o tempo de exposição.
- Se a placa ficar com folgas, vincos, sinais de deformação exagerada ou não ficarem transparentes, reduza o tempo de exposição.



Cuidado com a temperatura utilizada para moldar a placa para alinhador. Temperaturas elevadas podem ocasionar no aparecimento de bolhas. Observe se sua plastificadora possui controle de temperatura, caso não possua evite utilizar o equipamento superaquecido.

*Válido para todas as marcas e placas para alinhadores.



Para limpeza dos alinhadores:



MATA 99%
DAS BACTÉRIAS
E DOS FUNGOS

ELIMINA
MANCHAS
E PLACAS

+RÁPIDO
+EFICAZ

APROVADO POR
CIRURGIÕES DENTISTAS
CONFIRA!



A utilização de produtos abrasivos, como pastas de dentes podem trazer danos a aparência dos alinhadores ao longo do tempo.



Confira
o vídeo!

OrthoMundi



 orthomundishop.com.br

  0800 510 3001

 atendimento@orthomundi.com.br

 [@orthomundi](https://www.instagram.com/orthomundi)

 [@orthomundi](https://www.facebook.com/orthomundi)

 [youtube.com/orthomundi](https://www.youtube.com/orthomundi)